



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA



INSTRUÇÕES SOBRE COLETA – SARNA

Raspado de pele para a detecção de sarnas (*Sarcoptes* sp., *Psoroptes* sp., *Notoedres* sp., *Chorioptes* sp., *Otodectes* sp., *Demodex* sp. e *Knemidocoptes* sp.) em animais de grande e pequeno porte.

AMOSTRAS

Espécime	Quantidade	Forma de coleta
Raspado de pele	-	Raspado de pele profundo

CUIDADOS PÓS COLETA

Colocar o raspado de pele em um frasco com tampa e enviar ao laboratório a temperatura ambiente.

ENVIO DAS AMOSTRAS

- Verificar se as amostras estão devidamente identificadas antes do envio
- Colocar as amostras dentro de um saco plástico
- Preencher corretamente o Formulário de Requisição de Exames ([clique aqui para obtê-lo](#)) e colocar dentro de outro saco plástico
- Colocar as amostras e formulário dentro de uma caixa de isopor ou de papelão
- Colar na tampa da caixa o seguinte endereço: [clique aqui para versão de impressão](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
SETOR DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA
Campus Samambaia. Avenida Esperança, s/n, Campus Universitário
Goiânia-GO CEP: 74.690.900

ATENÇÃO: AMOSTRAS ENVIADAS SEM O FORMULÁRIO OU COM FORMULÁRIO INCOMPLETO, SERÃO DESCARTADAS!